

NX-168



Használati útmutató

Az NX-168 – a világ legkisebb behajtható fúvókás digitális alkoholszondája – egyéni véralkoholszint mérésére készült.

Bekapcsolás: Hajtsa ki a műanyag fúvókát és helyezze rá az átlátszó ajakfeltétet. Nyomja meg a zöld gombot a készülék oldalán. A sípoló jelzés után elkezdődik a bemelegedés és a félvezető érzékelő kalibrálása, amit a kijelző is mutat, mert megkezdődik a visszaszámlálás 10-től. A számláló a bemelegedés végéig ciklikusan számlál.

Mérésre kész: A bemelegedés végén a számláló leáll, a tizedespont kigyullad valamint egy sípolás jelzi, hogy a készülék mérésre kész.

Befúvás: Vegye a szájába az ajakfeltétet és kezdjen el folyamatosan fújni legalább 5 másodpercig. Egy folyamatos sípoló jelzés tudatja, hogy a mintavétel folyamatban van. A sípolás leállása a mintavétel bejezését jelzi. A mérési eredmény ezután jelenik meg a kijelzőn.

Leolvasás: A készülék mérési tartománya 0,0 – 2,5 ezrelék. A villogó **H** betű azt jelenti, hogy a mért érték magasabb, mint 2,5 ezrelék.

Kikapcsolás: A készülék kikapcsolható a zöld gomb megnyomásával. Amennyiben nem nyomja meg ezt a gombot az NX-168 15s elteltével automatikusan kikapcsolódik.

Új mérés: Új mérést mindig a kikapcsolt készülék bekapcsolásával indíthatunk!

A mérések között legalább 1 perc regenerálódási idő ajánlott!

Ne használja az alkoholszondát szeles időben vagy poros környezetben. Vegye ki az elemet, ha huzamosabb ideig nem fogja használni a szondát.

JELZÉSEK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

Figyelmeztető jelzés: A mérés után a villogó kijelző és a szaggatott hangjelzés arra figyelmeztet, hogy a véralkoholtartalom meghaladja a 0,5 ezreléket.

„0.0” az érték azt jelenti, hogy nem fogyasztott alkoholt, illetve az alkoholszint 0,1 ‰ alatt van.

„H” a véralkoholtartalom magasabb, mint 2,5 ‰

A villogó „LO” arra figyelmeztet, hogy az elem kimerülőben van.

FONTOS TUDNIVALÓK

1. A dohányzást illetve alkoholfogyasztást követő közvetlen mérés hamis eredményre vezethet. Ezért ne mérjen alkoholfogyasztás után min. 15 percig és dohányzás után min. 3 percig.
2. Csak alkalin elemeket használjon. Amint a készülék alacsony elemfeszültséget jelez, cseréljen elemet.
3. Az alkohol egyénenként különböző mértékben hat a képességekre és viselkedésre. Az ittas vezetésből származó balesetekért semmilyen módon nem vállalunk felelősséget, mivel a Magyarországon megengedett véralkoholtartalom 0,0 ‰!
4. Amennyiben valamilyen oknál fogva úgy érzi, hogy a készülék helytelen értéket mutat, szervizünkben csekély díjazás ellenében megvizsgáljuk.

A készüléket tiszta, száraz helyen kell tárolni az érzékelő védelme érdekében.

GARANCIA

Az NX-168 digitális alkoholszondára 1 év, telephelyünkön érvényes garanciát vállalunk.

MŰSZAKI ADATOK

- Méretek: 62 x 37 x 15 mm
- Tömeg: 32 g
- Burkolat: Ütésálló műanyag
- Kijelző: 0,28" kétszámjegyű LED
- Tápellátás: 1 db AAA alkalin elem
- Elem élettartam: 50-100 mérés (becsült adat, függ az elem fajtájától)
- Bemelegedési idő: 5 s
- Fúvási idő: 5 s
- Válaszidő: 5 s
- Mérési tartomány (véralkoholszint): 0,0 – 2,5 ‰
- Pontosság: $\pm 0,1$ ‰
- Működési hőmérséklet: 10 – 40 °C

NoXalc Egészségvédelem 1155 Budapest, Tóth István u. 105. Tel.: 414-4045 Fax: 414-4046

www.noxalc.com

www.alkoholszonda.info

www.adapter.hu