

NX-2600

Használati útmutató



Az NX-2600 digitális alkoholszonda egyéni véralkoholszint mérésére készült.

Bekapcsolás: Hajtsa ki a műanyag fúvókát a készülék bal oldalán és helyezze rá az átlátszó ajakfeltétet. Nyomja meg a gombot a készülék előlapján.

Mérésre kész: A bekapcsolást rövid sípolás jelzi majd elkezdődik a bemelegedés, amit a kijelző is mutat, mert elindul a visszaszámlálás 20-tól. A visszaszámlálás többször is megismétlődhet, de akkor már 9-től. A készülék mérésre kész állapotát egy rövid sípolás és az LCD kijelzőn az „Rdy” és „Blow” felirat megjelenése jelzi.

Befúvás: Vegye a szájába az ajakfeltétet és kezdjen el folyamatosan fújni legalább 5 másodpercig. A folyamatos sípoló hang és a kijelzőn egy növekvő szaggatott vonalsorozat tudatja, hogy a mintavétel folyamatban van. A sípolás leállása és a szaggatott vonalak maximuma a mintavétel bejezését jelzi. A mérési eredmény ezután jelenik meg a kijelzőn.

Leolvasás: A készülék mérési tartománya 0,0 – 4 ‰. A villogó **H** betű azt jelenti, hogy a mért érték magasabb, mint 4 ‰.

Kikapcsolás: A készülék kikapcsolható az előlapi gomb megnyomásával. Amennyiben nem nyomja meg ezt a gombot, az NX-2600 15s elteltével automatikusan kikapcsolódik.

Új mérés: Új mérést mindig a kikapcsolt készülék bekapcsolásával indíthatunk!

A mérések között legalább 1 perc regenerálódási idő ajánlott!

Ne használja az alkoholszondát szeles időben vagy poros környezetben. Vegye ki az elemet, ha huzamosabb ideig nem fogja használni a szondát.

JELZÉSEK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

Figyelmeztető jelzés: A mérés után a villogó kijelző és a szaggatott hangjelzés arra figyelmeztet, hogy a véralkoholtartalom meghaladja a 0,5 ezreléket.

„Snr” Az érzékelő nem kész a mérésre. Ez hosszú tárolás, szennyezett levegő vagy az érzékelőben visszamaradt alkohol következtében lép fel. Új érzékelő tisztítási folyamatot indíthat, ha az előlapi gomb megnyomásával kikapcsolja, majd újra bekapcsolja a készüléket.

„0.000” az érték azt jelenti, hogy nem fogyasztott alkoholt, illetve az alkoholszint 0,01 ezrelék alatt van.

„H” a véralkoholtartalom magasabb, mint 4 ezrelék

„Err” az érzékelő öntesztje nem futott le hibátlanul

Alacsony elemfeszültség: A kijelzőn a  jel megjelenése az alacsony elemfeszültséget jelenti. Csak alkalín elemet használjon.

FONTOS TUDNIVALÓK

1. A dohányzást illetve alkoholfogyasztást követő közvetlen mérés hamis eredményre vezethet. Ezért ne mérjen alkoholfogyasztás után min. 15 percig és dohányzás után min. 3 percig.
2. Csak alkalin elemeket használjon. Amint a készülék alacsony elemfeszültséget jelez, cseréljen elemet.
3. Az alkohol egyénenként különböző mértékben hat a képességekre és viselkedésre. Az ittas vezetésből származó esetleges balesetekért semmilyen módon nem vállalunk felelősséget, mivel a Magyarországon megengedett véralkoholtartalom 0,0 ezrelék!
4. A készülék speciális önkalibrációt végez a pontosság növelése érdekében.
5. Amennyiben valamilyen oknál fogva úgy érzi, hogy a készülék helytelen értéket mutat, szervizünkben csekély díjazás ellenében megvizsgáljuk.
6. A bemelegedési idő hossza függ a korábbi használaton kívül eltelt idő hosszától. Így az első mérés előtt általában jóval több idő szükséges a bemelegedéshez, mint a továbbiak előtt.

A készüléket tiszta, száraz helyen kell tárolni az érzékelő védelme érdekében.

GARANCIA

Az NX-2600 digitális alkoholszondára 1 év telephelyünkön érvényes garanciát vállalunk.

MŰSZAKI ADATOK

- Méretek: 126 x 44 x 22 mm
- Tömeg: 55 g
- Burkolat: Ütésálló műanyag
- Kijelző: négyjegyű LCD kék háttérvilágítással
- Tápellátás: 2 db AA alkalin elem
- Elem élettartam: 200-300 mérés (becsült adat, függ az elem fajtájától)
- Bemelegedési idő: 30-45 s
- Fűvási idő: 5 s
- Mérési tartomány (véralkoholszint): 0,0 – 4 ‰
- Pontosság: $\pm 0,01$ ‰
- Működési hőmérséklet: 10 – 40 °C

NoXalc Egészségvédelem 1155 Budapest, Tóth István u. 105. Tel.: 414-4045 Fax: 414-4046

www.noxalc.com

www.alkoholszonda.info

www.adapter.hu